

# Шприцы одноразовые стерильные объёмом 3 см<sup>3</sup> (мл) с иглами



Иглы типа Notched 27G (0.4мм) x 1 1/4" (32мм) для применения в профессиональной стоматологии (эндодонтии)  
DISPOSABLE STERILE SYRINGES 3ml with needles

## Инструкция по применению

### Наименование продукции:

Шприцы одноразовые стерильные объёмом 3 см<sup>3</sup> (мл) с иглами.  
(иглы типа Notched 27G (0.4мм) x 1 1/4" (32мм))

### Назначение:

Только для профессионального применения в стоматологии!

Применяются для промывания (ирригации) корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения в профессиональной стоматологии.

Шприц со специальным замком (Luer lock), обеспечивает надёжное соединение и фиксацию иглы. Оптимальный диаметр и длина иглы — 27G x 1 1/4" (0,4x32мм). Специальный атравматический срез иглы, обеспечивает качественную ирригацию корневого канала зуба.

### Применение:

- При помощи визуального осмотра убедиться в целостности упаковки.
- Извлечь шприц с иглой из индивидуальной стерильной упаковки.
- Убедиться в надёжной фиксации иглы на шприце (игла должна быть плотно зафиксирована в замковом креплении шприца (Luer lock), что можно проверить повернув иглу по часовой стрелке до упора).
- Снять защитный колпачок иглы.
- Набрать необходимый раствор, рекомендованный для данной процедуры (промывание корневых каналов зубов).  
(При наборе ирригационного раствора из флакона, имеющего защитный колпачок из пористого материала (например резиновый колпачок) без вскрытия флакона (забор раствора непосредственно через колпачок) необходимо использовать для этого отдельную стерильную иглу с острым окончанием. При этом строго соблюдать правила забора раствора.)
- Расположить шприц вертикально (иглой вверх), удалить воздух, нажимая на шток-поршень шприца.
- Перед началом процедуры необходимо измерить длину корневого канала, в котором будет проводиться ирригация. Продвижение иглы в корневом канале возможно на его длину минус 1-2 мм. (не доводя до апекса 1-2 мм.) Категорически запрещено продвижение иглы за апикальное отверстие!
- Обрабатываемый зуб должен быть изолирован в полости рта (например с помощью коффердама).
- Провести ирригацию (промывание) корневых каналов зубов.

### **Строго руководствоваться требованиями и методиками, установленными для данной процедуры (промывания корневых каналов зубов)!**

- При необходимости можно слегка согнуть иглу под необходимым углом (изгиб иглы не должен проводиться у основания иглы, правильно это сделать на некотором расстоянии — не менее 2мм от основания иглы). Нельзя допускать неоднократное сгибание/разгибание иглы в одном и том же месте (для исключения перелома иглы).
- Давление на поршень шприца во время процедуры должен быть плавным и не сильным. Рядом с обрабатываемым зубом следует помещать наконечник слюноотсоса, который вместе с продуктами распада быстро удалит вытекающий обратно раствор, для исключения контакта ирригационного раствора со слизистой оболочкой полости рта.
- Утилизировать шприц и иглу согласно требованиям к утилизации данного изделия.

### Утилизация использованной продукции:

Утилизировать шприц и иглу согласно требованиям к утилизации данной продукции, установленным в Российской Федерации (руководствоваться нормативно-правовыми актами, постановлениями и приказами относительно утилизации данного вида продукции).

### Меры предосторожности:

- Не использовать продукт с истекшим сроком годности!
- Не использовать продукт с нарушенной упаковкой!
- Не использовать шприц и иглу, имеющие повреждения!
- Использовать только по назначению (для промывания корневых каналов зубов).
- Не использовать шприц и иглу повторно! Только для однократного использования!
- Использовать для ирригации только разрешённые и рекомендованные для данного вида процедуры растворы!

### Срок годности:

Срок годности и дата изготовления указаны на упаковке.

### Хранение:

Хранить в отапливаемых и хорошо вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°С при влажности не более 80%.

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2009/03552 от 28 января 2009г.

Срок действия: не ограничен.

### Manufacturer/Производитель:

“Тяньжинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.  
Tianjin Medic Medical Equipment Co., Ltd.  
Yumen Road, Yangzhuangzi, China  
Tel.: 86-2258015866



### Ограничение ответственности:

Шприцы одноразовые стерильные объёмом 3 см<sup>3</sup> (мл) с иглами (иглы типа Notched 27G (0.4мм) x 1 1/4" (32мм)) разработаны и произведены исключительно для профессионального применения в стоматологии и должны использоваться строго в соответствии с данной инструкцией по применению. Производитель не несёт ответственности в случае использования данной продукции не по инструкции и (или) не по назначению. Во всех случаях применения шприцов одноразовых стерильных объёмом 3 см<sup>3</sup> (мл) с иглами (иглы типа Notched 27G (0.4мм) x 1 1/4" (32мм)), явно не указанных в инструкции и (или) при нарушении любого из пунктов данной инструкции, вся полнота ответственности ложится на потребителя.